

**Состав:** вспененный полипропилен

**Описание продукта:** Не все звуки приятны и безопасны для нашего слуха.

Сопровождающий нас «привычный» шум города, звуковой фон дома (храп, шумные соседи) и на работе (офисный гул, телефонные звонки) – могут стать серьезным стрессовым фактором, который приводит к нарушению глубины и продолжительности сна, мешает сосредоточиться и быть эффективным. Длительное недосыпание способствует развитию головной боли, раздражительности, астении, нарушению работоспособности, становится фоном для сосудистых заболеваний. Обращаясь в аптеку за успокоительными или снотворными, надо помнить, что, не избавившись от шума, эффект от этих препаратов будет недостаточным и кратковременным. С берушами Mask's" вы быстро и легко забудете о этой проблеме, они снижают интенсивность шума на 29-32 децибелов и вы сможете достигнуть здорового и крепкого сна, максимально сосредоточиться на работе и учебе.

**Рекомендации по применению:** для защиты от шума в дневное и ночное время.

**Способ применения:** беруши скатать в плотный узкий цилиндр. Затем поместить в слуховой проход, оставив на поверхности небольшое количество материала, чтобы их можно было извлечь. Через некоторое время беруши самостоятельно расправятся и примут форму слухового прохода. Вынимать беруши нужно медленно, круговыми движениями, постепенно.

Внимание! Быстрое удаление берушей может привести к повреждению барабанной перепонки!

**Меры предосторожности:**

- беруши используются только для наружного применения;
- беруши из полипропилена пригодны для одноразового использования;
- избегайте намокания берушей;
- хранить беруши нужно в недоступном для младенцев и маленьких детей месте.

**Дата изготовления:** смотрите на упаковке.

**Условия хранения:** хранить в сухом месте

**Срок годности:** неограничен.