

Показання до застосування:

Дитячі пластирі після укусів комах **Kids After Bite** розроблені спеціально для дітей. Вони створені для полегшення неприємних відчуттів після укусів комах: зменшення свербіжу, зниження припухлості і почервоніння. Крім того, пластир захищає місце укусу від попадання мікробів, бруду і не дає дитині далі “розчісувати” рану.

Дитячі пластирі після укусів комах **Kids After Bite** легко і без болю видаляються, не залишаючи слідів клею на шкірі.

Спосіб застосування:

1. Очистіть місце укусу і шкіру навколо нього від забруднення і вологи.
2. За допомогою аплікатора зніміть захисну плівку і щільно зафіксуйте пластир на запаленій ділянці.

Тільки для зовнішнього застосування! Не залишати на шкірі довше 8 годин.

Застереження:

Індивідуальна непереносимість матеріалів. Гіпоалергенність матеріалів знижує ймовірність прояву алергічних реакцій, але не виключає їх виникнення.